

# 高齢者施設等職員に対する

# 新型コロナウイルス感染症PCR検査事業

※株式会社ナチュラリは京都府から委託を受けて本事業を実施しています

## - 検体採取キット申込から結果報告までの流れ -

### 1 検体採取キットの申込 **申込はできるだけ6月18日(金)までに済ませてください。**

下記URLもしくは右記QRコードより、メールアドレスのご登録、検体採取キット数のお申込をお願いいたします。

<https://entry.covid19test.jp/kyotopref/>

↳ユーザー名：pcr

↳パスワード：pcr



### 2 検体採取キットの受取、検査に向けた準備

#### <検体採取キット受取>

当社からの発送手配が完了後、ご登録のメールアドレスにその旨ご連絡します。検体採取キットが施設に届きましたらまず内容物をご確認ください。

##### 【説明資料】

検体採取キット申込から結果報告までの流れ（本紙）、検体採取説明書、梱包集荷説明書、返送用着払伝票、安全性適正包装確認済シール

※各種説明書や説明動画を下記URLもしくは右記QRコードより、ご覧いただけます。

<https://covid19test.jp/html/page37.html>

（パスワード：kyotopref）



##### 【検体採取キット】

梱包集荷説明書に送付物のご案内がございます。

そちらをご覧いただきながら、必ず内容物をご確認ください。

#### <検査に向けた準備>

**検体を各検体提供者様にお渡しになる前、或いは、お渡しする際に必ず「検体ID・氏名送付票（エクセル）」に検体IDに対応する氏名をご入力ください。**

※「検体ID・氏名送付票」は、検体採取キット発送のご案内のメールに添付しております。

### 3 検体採取

検査対象者（受検者）へ“検体ID”と“氏名”を確認の上、取り違えないように「検体採取キット」「検体採取説明書」を配布してください。

検査対象者（受検者）は必ず「検体採取説明書」に従い、ご自身で検体を採取してください。

※検体採取キットは本事業期間中であれば問題なくお使いいただけます。  
常温にて保存ください。

※**ご返送（発送）**いただく**前々日から検体採取**してください。  
検体採取から1週間以上経過した場合は、検査ができませんのでご注意ください。

## 4 検体の返送 **3 検体採取後、速やかに返送してください** (6月中に返送できるよう検体を採取してください)

### <梱包・返送>

同梱している「検体梱包集荷説明書」に必ず従い、梱包してください。

「**検体ID・氏名送付票**」1部印刷したものを**輸送容器に同梱して**、  
ゆうパック（着払）の集荷依頼をしてください。

※ゆうパックの集荷は施設よりご依頼ください。

※直接郵便局へ持ち込んでいただいても構いません。

※未使用の検体採取キットがありましたら、検体と分けて輸送容器に同梱してください。

※**1施設様ごとに一括でご返送ください。**

### <当社へメールでご連絡>

集荷の準備ができましたら、以下の内容をメールにて送付ください。

- ゆうパック着払い伝票お問い合わせ番号
- 「検体ID・氏名送付票」必要事項をご入力したExcelデータ

[送信先]	kyotopref@coronavirus19test.jp
[メール件名]	【施設名】ゆうパック発送_着払い伝票お問い合わせ番号
[添付ファイル]	検体ID・氏名送付票

## 5 検査結果の報告

「検体ID・氏名送付票」にご入力いただいたメールアドレス宛に検査結果をご報告いたします（PDFデータ添付して送付します）。

※キット発送のご案内の際に添付した「検体ID・氏名送付票」内に記載したパスワードを設定しております。パスワードをご入力の上、ご確認ください。

※検査結果は京都府へも報告しますので、ご承知おきください。

※陽性反応があった場合は、管轄の保健所等へご連絡ください。

※検査結果のご報告は陽性反応があったものを優先して行っております。

お問い合わせ先

株式会社ナチュラリ  
東京PCR衛生検査所

(登録衛生検査所 登録番号 2渋谷生医第935号)

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-20-12 北参道96ビル

☎ 03-6447-1574 ✉ kyotopref@coronavirus19test.jp  
(京都府専用窓口 / 9:00~17:00 ※土日祝含む)